



アートプラスター

DENTAL PLASTER  
FOR TOOTH ENGRAVING

# アートプラスター

歯形彫刻用焼石膏

アートプラスターは、彫刻作業の徹底分析と  
新しい製造技術開発により開発された彫刻用石膏です。  
初心者だけでなく、ベテランの術者にも  
納得して頂ける彫刻操作性です。



均一な硬さ

滑らかな  
削り心地

歯形彫刻用

サンエス石膏株式会社  
SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

初心者だけでなく、ベテランの術者にも  
納得して頂ける彫刻操作性です。

## 特長

- 1 彫刻に適した硬さです。(混水量により硬さを調整できます)
- 2 全体の均質性が高く、微細加工が容易です。
- 3 軽く磨くだけで仕上げが容易です。  
※気泡混入防止のため、真空機械攪拌をお奨めします。  
※グレー色は色ムラ防止のため、型枠には多めに流し込んで下さい。

## 色調

ホワイト、グレー(陰影が見やすい)

## 包装

20kg袋入り

## 物理的性質

(試験方法:真空機械攪拌30秒間)

試験項目 Test Items	測定値(注) Values determined
混水比(水/粉) Water/Powder ratio(W/P)	<b>0.45</b>
硬化時間(分) Setting time (min)	<b>12</b>
線硬化膨張<2時間後>(%) Linear setting expansion <2hr>	<b>0.35</b>
圧縮強さ<1時間後>(MPa) Compressive strength <1hr>	<b>20</b>

試験方法:JIS T6604による (タイプ2)

Test Method:Based on JIS T6604

(注)測定値は、弊社での代表的な値であり規格値ではありません。

※200gで15×15×100mmの彫刻棒が5本製作できます。

※グレー色アートプラスターの乾燥硬化体マンセル指標

無彩色 明度 8.01(ミノルタカラーリーダーCR-11による)

一般医療機器 届出番号27B2X00022000029 製造販売元:サンエス石膏株式会社



大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
大阪営業所 | TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

東京営業所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F  
TEL.03-5283-6201 FAX.03-5283-6205

中部営業所 | 〒489-0983 瀬戸市苗場町113  
TEL(0561)82-9185(代) FAX(0561)85-4179

福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F  
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>  
E-mail : [headquarter@san-esugypsum.co.jp](mailto:headquarter@san-esugypsum.co.jp)

サンエス石膏

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

H000000M